

Herpotherm

Til behandling af forkølelsessår



Herpotherm® er et medicinsk apparat, som kan forebygge udviklingen af 95 % af herpes på læberne, hvis det bruges på det rigtige tidspunkt. Ubehagelige og uskønne blærer eller sår kan undgås. Apparatet har form som en læbestift og er lille og kompakt. Derfor er det nemt at tage med, så det kan bruges straks behovet opstår. Enhver, uanset køn eller alder, kan bruge **Herpotherm®**. Af hygiejnemæssige årsager er apparatet kun til personligt brug og kan derfor ikke ombyttes eller returneres efter køb.

Med **Herpotherm®** bekæmpes symptomer på Herpesinfektioner effektivt. Men infektion med Herpes-simpleks-virus kan derimod ikke fjernes.


Funktion

Behandling af herpes med Herpotherm® sker ved hjælp af koncentreret varme (50-51 °C). Bruges den på det rette tidspunkt, forebygges blæredannelsen og symptomer som: stikkende, svidende og snørende fornemmelser samt kløe og smerte mindses hurtigt. Ved at opvarme de celler, der er inficeret med herpesvirus, kan enzym- og proteinstrukturen ændres fuldkommen eller næsten fuldkommen. En udvikling af virusen er derfor forebygget, og blærer på læberne undgås. Under den dermatologiske test blev udviklingen af blærer på læberne fuldkommen undgået hos forsøgspersonerne, når **Herpotherm®** blev brugt på det rigtige tidspunkt. Blev apparatet brugt senere, medførte **Herpotherm®** en reduceret udvikling og/eller en tidligere heling. **Herpotherm®** er et medicinsk apparat fremstillet i Tyskland, og det færdige produkt er 100% kontrolleret. Uønskede bivirkninger eller patologiske hudændringer i områderne omkring læberne blev undersøgt i den dermatologiske test.


Anvendelse



Tag hættten af **Herpotherm®**.

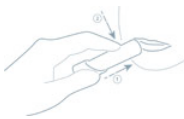

Placer den guldbelagte varmeplade på det område, hvor der er symptomer. Tryk på knappen. Opvarmningsfasen starter og markeres med et akustisk signal. En lysdiode viser når behandlingstemperaturen er nået. Behandlingstiden er ca. 4 sek. Det akustiske signal høres igen. Dette markerer afslutningen af behandlingen og lysdioden slukkes.

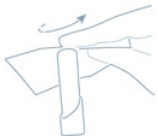

Efter brug renses **Herpotherm®**'s kontaktområde med en desinficerende opløsning. Denne procedure skal udføres omhyggeligt, da herpes-virus kan spredes fra en del af kroppen til en anden.

Hvis De ønsker yderligere oplysninger, er De velkommen til at besøge vores hjemmeside: www.wiotech.com

Producent: BSM – Bionic Solution Management GmbH * Fleicherstrasse 18 * D-17489 Greifswald.