



wiotech

ThermoKlinik



Pris kr. 465,00

Inkl. moms



Fjernmåling af kropstemperaturen

ThermoKlinik er den innovative metode til at måle kropstemperaturen med. Den eksklusive infrarøde teknologi gør det muligt at måle kropstemperatur i en afstand op til 10 cm væk fra panden.

Det er nemt at måle temperaturen med ThermoKlinik: Åben apparatet ved en roterende bevægelse, tryk ned på knappen, og i løbet af nogle få sekunder giver ThermoKlinik respons.

- **Op til 10 cm væk**

PiC ThermoKlinik bruger en ny måleteknik, der kan måle pandetemperaturen i op til en afstand af 10 cm med maksimal nøjagtighed. Den lysende indikator viser området der måles på for at sikre en endnu større nøjagtighed.

- **Nøjagtig**

PiC ThermoKlinik opfylder Europæiske og Amerikanske standarder for infrarøde termometre. Hver batch bliver meget strengt kontrolleret af nøjagtigt måleudstyr, så det kan garanteres, at termometeret har en meget høj nøjagtighed fra 0 til 10 cm væk fra panden.

- **Hurtig**

PiC ThermoKlinik måler temperaturen meget hurtigt: kun ca. 4 sekunder – så lyder et akustisk signal og målingen er foretaget.

- **Klinisk testet**

PiC ThermoKlinik er blevet valideret på hospitaler og klinikker, der har bekræftet dets store nøjagtighed. +/-0,2 gr.

- **Hukommelse:** Husker de sidste 8 målinger.

Intuitiv teknologi og ultra moderne design: Thermoklinik er PiC Indolors løsning for hele familien.

CE0123



wiotech

Code	Description	Pack(pcs)	Box (pcs)	Ean
0002331100000	Remote infrared thermometer	1	6	8003670151487

Brugsvejledning:

1. Der kan måles med små cirkulende bevægelser, i en afstand af maks. 10 cm, ved begge tindinger.
2. Personen, der måles på, skal have været i ro således evt. afkøling af huden, i forbindelse med gang eller løb, ikke vil have indflydelse på resultatet.
3. Huden skal være tør.
4. Evt. hår, der dækker tindingen, skal væk og evt. varmeophobning på grund af dette, skal have lov at fortage sig.

Hold knappen nede indtil der lyder et akustisk signal, der viser målingen er slut.

